



Instrucciones para importar
las librerías gmi
en el software **exocad**

Descargar el software

Desde el ordenador, conectarse a **www.ilerimplant.com**

En el menú **PRODUCTOS**, ir al apartado **Librerías CAD/CAM** y seleccionar el modelo de implante.

Clicar encima de **exocad**

Se descargará un archivo llamado *GMI_Modelo Implante_RevX.zip* (Ej: *GMI_Avantgard_Rev0.zip*) en la carpeta *Descargas* de su ordenador.

Descomprimir el archivo

Vaya a la carpeta *Descargas* de su ordenador y descomprima el archivo llamado *GMI_Modelo_RevX.zip*.


Para descomprimir el archivo puede utilizar un descompresor estándar descargado de internet como [7-zip](#).

Cuando descomprima el archivo le saldrá una carpeta llamada “*GMI_Modelo_RevX*” (Ej: *GMI_Avantgard_Rev0*) que contiene las librerías de **gmi** para Exocad.


Mantenga abierta la carpeta *Descargas*.

Localizar la carpeta de librerías en Exocad



Abra la ventana donde se encuentran sus librerías de Exocad. Para ello vaya buscándolas a través del navegador de archivos de su ordenador en la ruta indicada:

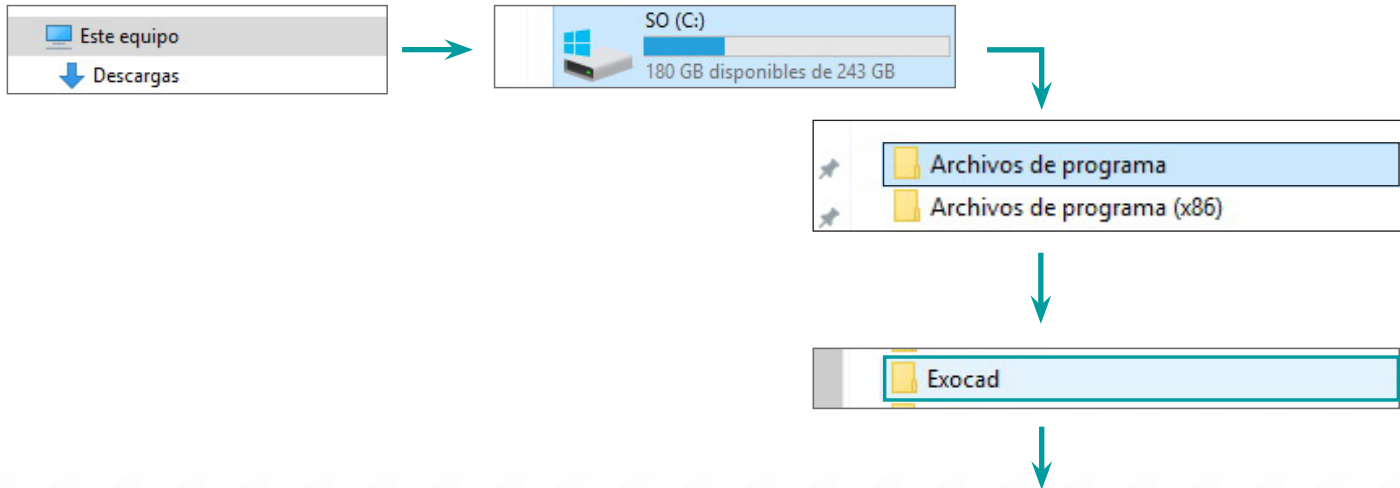

Localizar la carpeta de librerías en Exocad

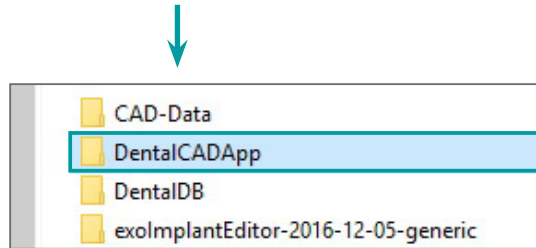

En esta carpeta llamada *implant* es donde se alojarán las librerías de **gmi**.

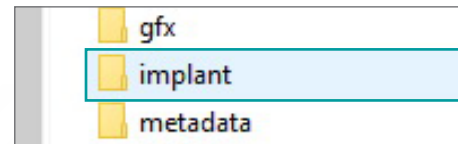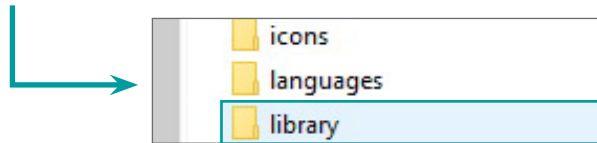

Copiar las librerías GMI en la carpeta de librerías de Exocad

Ponga la carpeta *Descargas* (que contiene la carpeta de librerías de **gmi**) al lado de la carpeta *implant* de Exocad.



Seleccione la carpeta *GMI Modelo_RevX* y pulse el botón derecho del ratón. Elija "Copiar".

Encima de la carpeta *implant* y pulsando el botón derecho seleccione "Pegar".

Comprobación

Asegúrese que tiene las librerías correctamente copiadas en el menú de librerías de Exocad.

Entre en la carpeta *implant* y localice los archivos.

Ejecutar Exocad

Ejecutar Exocad y elegir la interfase de **gmi**.

exocad

Gracias por su confianza

